

APESIN swift



Applications et dosage



Laver les mains ou la peau, rincer et sécher.




Appliquer le produit sur la peau intacte pendant min. 30 sec.





Soins de santé:

Appliquer le produit sur la surface. Respecter le temps de contact. Essuyer avec du papier ou un chiffon propre.

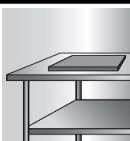

Nettoyer et rincer les surfaces

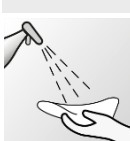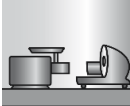

Appliquer le produit sur la surface. Respecter le temps de contact. Essuyer avec du papier ou un chiffon propre.



Le produit doit rester au moins 5 min. sur la surface.

Désinfectant à base d'alcool

■ Prêt à l'emploi ■ Désinfectant à large spectre ■ PT1,PT2,PT4

- APESIN swift est un désinfectant prêt à l'emploi pour la désinfection des petites surfaces (0.5 m²).
- APESIN swift est autorisé en Belgique sous N° 1319B.
- APESIN swift à une activité bactericide, lévuricide, fongicide et virucide.
- APESIN swift est un produit autorisé dans le " circuit libre ".

Domaine d'application

PT 1: Hygiène humaine: uniquement sur la peau intacte.

PT 2 : Surfaces et instruments utilisés dans le secteur de soins de santé et de soins animaliers ainsi que dans les salons de beauté, salons des ongles, manucure, pédicure et studio de tatouages.

PT 4 : Surfaces, appareils et instruments qui lors de la préparation peuvent entrer en contact direct avec les aliments/boissons ainsi que dans l'industrie alimentaire.

Ingrédients: Éthanol, Isopropanol, eau.

Sustainable development and production:



Instructions de sécurité, de stockage et environnementales

Sécurité: Uniquement pour usage professionnel. Ne pas fumer. Pour des informations supplémentaires consultez la Fiche de sécurité du produit.

Stockage: A température ambiante dans son emballage d'origine.

Gardez à l'écart de la chaleur, des surfaces chauffées, des étincelles, du feu ouvert et des sources d'ignition.

Environnement : Déposez uniquement des emballages entièrement vide dans le container.

Le partenaire à votre service:

Unité de vente:

Ref: WM0714962 20 x 500 ml

Valeur pH:



APESIN swift

Normes de désinfection de l'APESIN swift

| ACTIVITÉ | CONDITIONS | TEMPS DE CONTACT |
|------------------------------|------------|------------------|
| Bactéricide | | |
| EN 1500 | - | 30 sec. |
| EN 13727 | Propreté | 5 min. |
| EN 13697 | Propreté | 5 min. |
| Lévuricide | | |
| EN 13624 | Propreté | 5 min. |
| EN 13697 | Propreté | 5 min. |
| Fongicide | | |
| EN 13624 | Propreté | 5 min. |
| EN 13697 | Propreté | 5 min. |
| Virucide | | |
| EN 14476 - Poliovirus type 1 | Propreté | 5 min. |
| EN 14476 - Adenovirus type 5 | Propreté | 5 min. |
| EN 14476 - Norovirus | propreté | 5 min. |
| EN 14476 - Rotavirus | Propreté | 5 min. |